

Protemp™ Crown

Corone per provvisori



Estetiche, resistenti e veloci.

Protemp Crown le prime innovative corone in composito per provvisori.

Protemp Crown Temporization Material sono corone singole in composito, preformate, pronte per l'uso, fotopolimerizzabili, malleabili ed estetiche per proteggere adeguatamente la preparazione del dente. Una volta adattate alle esigenze anatomiche del paziente possono essere fissate con cemento provvisorio.

Facili: acquisita una breve esperienza è possibile realizzare una corona provvisoria in 5 minuti senza necessità di matrici o impronta.

Resistenti: confrontati con altri materiali per provvisori, Protemp Crown ha dimostrato elevata resistenza alla compressione e una resistenza meccanica superiore alla media.

Estetiche: il materiale composito, consente di realizzare provvisori molto estetici e simili ai denti naturali.


Tre semplici passaggi 1-2-3.

Le corone sono disponibili in un colore universale e in 9 misure. Prima di applicarle scegliere la misura appropriata e adattarla alla zona di applicazione. Quindi fotopolimerizzarla, lucidarla e cementarla con RelyX Temp NE o altro cemento provvisorio simile. Le corone possono essere adattate o ribasate usando un composito fluido come Filtek Supreme flowable.

- 9 misure disponibili
- Adattabili dal cliente
- Eccellente resistenza
- Estetiche e naturali
- Fotopolimerizzabili
- Basso sviluppo di calore durante la fase di applicazione
- Uno strato sottile con inibizione all'ossigeno
- Senza odore
- Facile da ribasare con l'aiuto del composito flow



Adattare e sagomare seguendo il bordo gengivale.

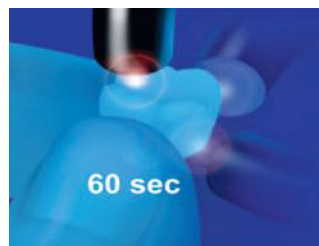

Fotopolimerizzare.



Rifinire e lucidare.

La testimonianza di quelli che le hanno provate:

"Fare provvisori oggi è diventato più semplice: senza bisogno di impronte preliminarì è possibile realizzare un provvisorio estetico, facile da realizzare, subito pronto e senza bisogno che il paziente ritorni in studio.

Inoltre la preparazione è ben protetta e molto confortevole per il paziente. Decisamente un bel successo per la 3M ESPE".

Joseph A. Blaes, DDS

Utilizzo di Protemp™ Crown su impianto con abutment in donna di 19 anni con avulsione del 27.

Caso clinico del DR. Robert Margeas Des Moines Iowa



1. Impianto in titanio con abutment in fase di guarigione.



2. Impianto posizionato.



3. Corona Protemp™ Crown posizionata aiutandosi con uno strumento.



4. Corona Protemp™ Crown cementata.

Informazioni per l'ordine



Protemp™ Crown Temp Promotional Kit



Protemp™ Crown Temp Kit introductivo



Protemp™ 3 Garant™ Composito per corone e ponti temporanei Kit introductivo

Codice	Descrizione
	Protemp™ Crown Temporization Material
50600SAM	Promotional Kit: 50600 Kit 42 corone; strumenti per la misura della corona (2 buste da 10); istruzioni; guida; cassetto di corone ed etichette; Misure: 6 molari sup. large, 6 molari sup. small, 6 molari inf. large, 6 molari inf. small, 4 premolari sup. large, 4 premolari sup. small, 4 premolari inf. 3 canini large, 3 canini small. 1-50613 5 corone ricambio (molari inf. small); istruzioni e strumento per la misura.
50600TK	Trial Kit 16 corone; strumenti per la misura della corona (2 buste da 10); istruzioni; guida; 3 molari sup. large, 3 molari sup. small, 2 molari inf. large, 2 molari inf. small, 2 premolari sup. large, 2 premolari sup. small, 2 premolari inf. Ricambi
50610	Molari superiori large 5 corone provvisorie; strumenti per la misura della corona; istruzioni.
50611	Molari superiori small 5 corone provvisorie; strumenti per la misura della corona; istruzioni.
50612	Molari inferiori large 5 corone provvisorie; strumenti per la misura della corona; istruzioni.
50613	Molari inferiori small 5 corone provvisorie; strumenti per la misura della corona; istruzioni.
50614	Premolari superiori large 5 corone provvisorie; strumenti per la misura della corona; istruzioni.
50615	Premolari superiori small 5 corone provvisorie; strumenti per la misura della corona; istruzioni.
50616	Premolari inferiori 5 corone provvisorie; strumenti per la misura della corona; istruzioni.
50617	Canini large 5 corone provvisorie; strumenti per la misura della corona; istruzioni.
50618	Canini small 5 corone provvisorie; strumenti per la misura della corona; istruzioni.
	Protemp™ 3 Garant™ Composito per corone e ponti temporanei
46931	Kit Introductivo A3 1 Cartuccia 50 ml; 15 Garant mixing tips; 1 Dispenser Garant 4:1/10:1

3M ESPE

3M Italia S.p.A.
Via San Bovio, 3 - Loc. San Felice
20090 Segrate (MI)
Tel. 02.7035.2154 - Fax 02.7035.2061
3mespeitaly@mmm.com
www.3mespe.com

3M, ESPE, Garant e Protemp sono marchi di fabbrica di 3M o 3M ESPE AG.

© 3M 2007.
Tutti i diritti sono riservati.
01 (9.2007)