



#### **Il sistema Ena Matrix comprende:**

- matrici sezionali, anatomiche, disponibili nelle seguenti misure: 3,5 mm per pedodonzia; 4,5 e 5,5mm per restauri sopra gengiva; 6,5 mm per restauri che interessano l'area sub-gengivale
- cunei anatomici, codificati per colore, disponibili in 3 misure: small (white); medium (pink); large (violet)
- anelli disponibili in due misure: per molari (black); per premolari e pedodonzia (orange)
- pinze per anelli e pinzette per cunei/matrici

#### **Avvertenze**

- Utilizzare sempre una diga di gomma per evitare che il paziente possa inalare o ingerire i pezzi.
- Gli articoli di consumo (cunei, matrici) sono monouso
- Per garantire la completa sterilità, autoclavare gli anelli, le pinze e le pinzette con il perno prima dell'uso (134°C minimo 3 minuti)
- Si raccomanda di utilizzare la pinzetta con perno con le matrici e i cunei del sistema Ena Matrix. Queste pinzette con perno riducono al minimo la possibilità di rilascio accidentale della matrice o del cuneo prima del suo posizionamento e consentono la rimozione di questi componenti in modo sicuro e controllato.

#### **Istruzioni per l'uso**

A. Tenere la matrice con l'apposita pinzetta con perno. Quindi piegare la linguetta verso di voi. In questo modo si facilita l'inserimento della matrice nella zona interdentale. Stringere leggermente le estremità della matrice per aumentarne la curvatura creando in questo modo maggior spazio per l'anello.

B. Posizionare la matrice interprossimalmente, sulla preparazione, facendo attenzione che la stessa sia nel solco gengivale adiacente al dente che si deve ricostruire. Se la cavità è una "MO", si deve ruotare la matrice, ma la linguetta deve comunque essere piegata verso di voi.

C. Tenendo l'aletta della matrice contro la superficie vestibolare o linguale del dente con il dito medio, rilasciare la pinzetta. Utilizzando le punte della pinzetta piegare la linguetta dall'altro lato in modo da posizionarla sulla cresta marginale del dente adiacente. Questo non è necessario per una cavità "MO".

D. Tenendo ferma la matrice sul lato vestibolare o linguale, bloccarla con l'indice. Se la linguetta non è esattamente centrata, si possono fare piccole correzioni con il dito medio prima di bloccarla contro la cresta marginale del dente adiacente.

E. Tenere il dito indice sull'aletta per evitare il movimento della matrice. Chiedere all'assistente di posizionare un cuneo della misura adatta nella pinzetta con perno. Inserire il cuneo dal lato destro (se siete destri) e spingerlo fino in fondo.

F. Chiedete all'assistente di passarvi l'anello già inserito nelle pinze con il blocco aperto. **NON AFFRETTATEVI!** Utilizzando un dito per stabilizzare le pinze, molto lentamente posizionare l'anello in modo che blocchi il cuneo, assicurandosi che sia a diretto contatto con lo stesso senza che possa ulteriormente muoversi in senso apicale.

#### **Note**

Le punte dell'anello devono essere vicine al margine gengivale e lo slot dell'anello a contatto con il cuneo. Qualche volta è meglio posizionare l'anello distalmente: un esempio è una cavità "MOD" o una "DO".

L'anello consente di posizionare facilmente un secondo cuneo dall'altro lato. In questo modo si ha una flessibilità unica, consentendo al dentista di apportare facilmente correzioni senza dover ricominciare da capo. Occasionalmente l'anello potrebbe necessitare di essere resettato, specie se è stato allargato troppo. E' sufficiente premere con forza le due estremità con l'apposita pinza.



#### **MICERIUM S.p.A.**

Via Marconi, 83 - 16036 Avegno (GE) - Italy

Tel. 0185 7887.870 • Fax 0185 7887.970

www.micerium.it • email: micerium@micerium.it

